



注：

- 1) 检查室假顶高度：建议为2750毫米。
- 2) 检查室辐射防护须符合当地要求。（详见手册“安全防护连锁”章节）
- 3) X光警告灯要求:内置220伏特灯泡,灯泡功率不大于20瓦,客户须穿好一对(两根)1.5平方毫米电线到 3 号机柜(用于警告灯连锁)。（详见手册“安全防护连锁”章节）
- 4) 门开关要求(若需要): 门关上后开关闭合；客户须穿好一对(两根)1.5 平方毫米电线到 3号机柜(用于门机连锁)。
- 5) 主机侧面详图: ‘X-X’方向及‘Y-Y’方向，详见图‘AD’。
- 6) 建议客户在控制室内安装宽带，以配合远程诊断的应用。

系统布局图

设 备 部 件 列 表						
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	A 由飞利浦负责提供并安装					
	B 由第三方厂家负责提供并安装					
	C 由院方负责提供并安装					
	D 选项 / 日后可能添置设备					
部 件 编 号						
部 件 代 码						
			部 件 名 称	重 量 (KG)	产 热 量 (W)	噪 音 [dB(A)]
A	1	TH	DigitalDiagnost TH 床	289	280	---
A	2	CS	悬吊架 - CS2	430	380	<55
A	3	GC	发生器柜(65KW)	251	500	≈46
A	4	VS	立式胸片架	275	170	<55
A	5	OC	控制台	31	186	<35
A	6		CS2出线口	---	---	---
A	7		电源总开关	---	---	---
C	8		X光警告灯	---	---	---
C	9		门开关	---	---	---

电缆长度列表					
	GC	TH	CS	VS	OC
1	GC---TH 7m, F				
2	GC---CS 10m, C				
3	GC---VS 17m, F/C				
4	GC---OC 17m, F				
5	TH---OC 30m, F				
6	VS---OC 30m, F				